

# ARMOURBITE®



RB DENTAL SOLUTIONS – Exklusive Licensee




GET STARTED AND CHANGE YOUR LIFE TODAY

# ARMOURBITE®



RB DENTAL SOLUTIONS – Exklusive Licensee

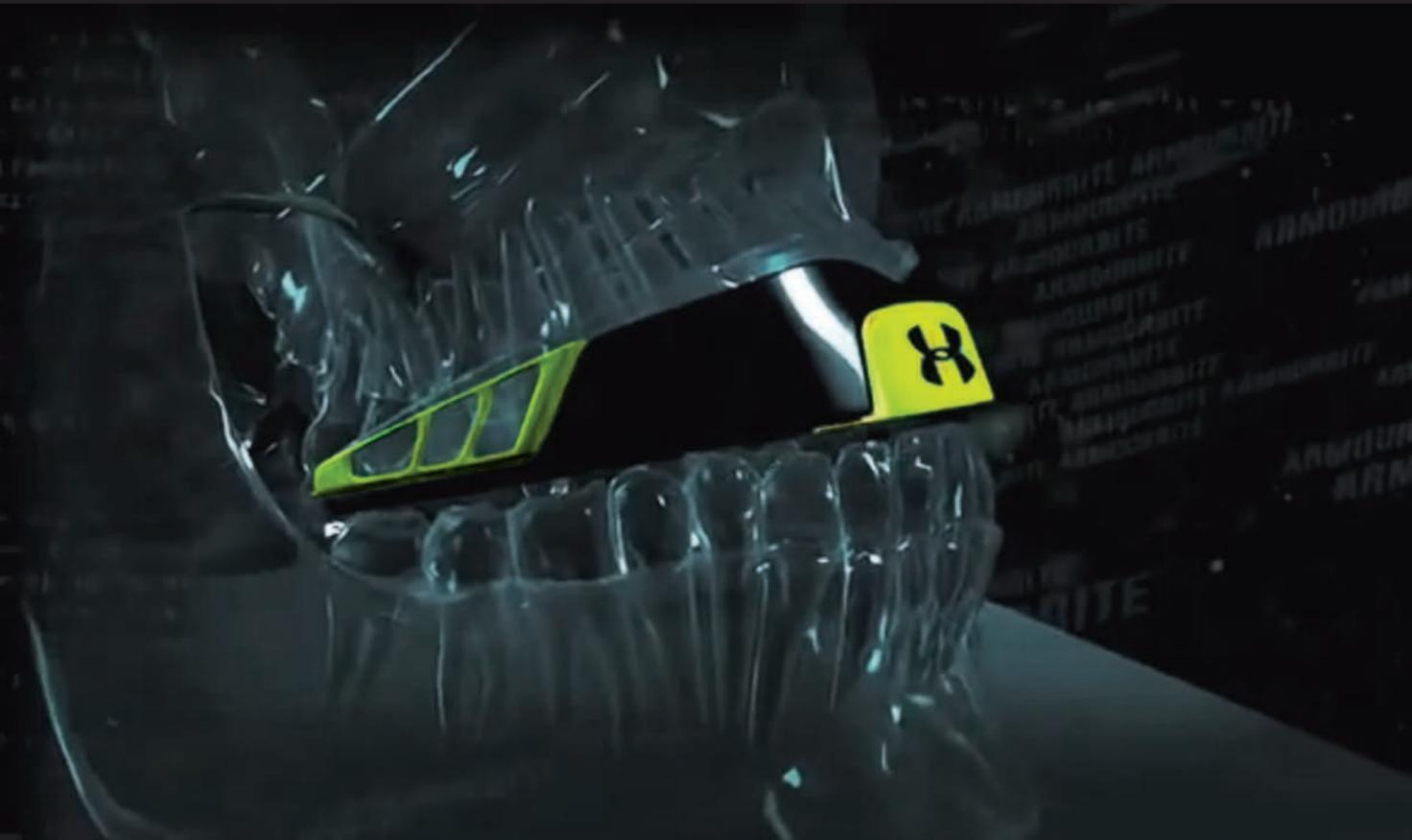

R&B Dental Solutions GmbH  
Geschäftsführer: Dr. Joachim Rosswag  
Hauptstr. 42  
68259 Mannheim  
+49 - 151 - 50 400 122  
customerservice@armourbite.de  
Registergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 7825



YouTube

# CONTENT

ARMOURBITE  
ALS KNIRSCHERSCHIENE

4

GESUNDHEIT

6

BALANCE CARE

8

ARMOURBITE MOUTHGUARD  
UND MOUTHPIECE

14

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

16

BLOGGING FAMILY

18

PROVIDER IN EUROPA & UK

20

FITTING INSTRUCTIONS


22

PARTNER

24

WIE WERDE ICH ANBIETER

24

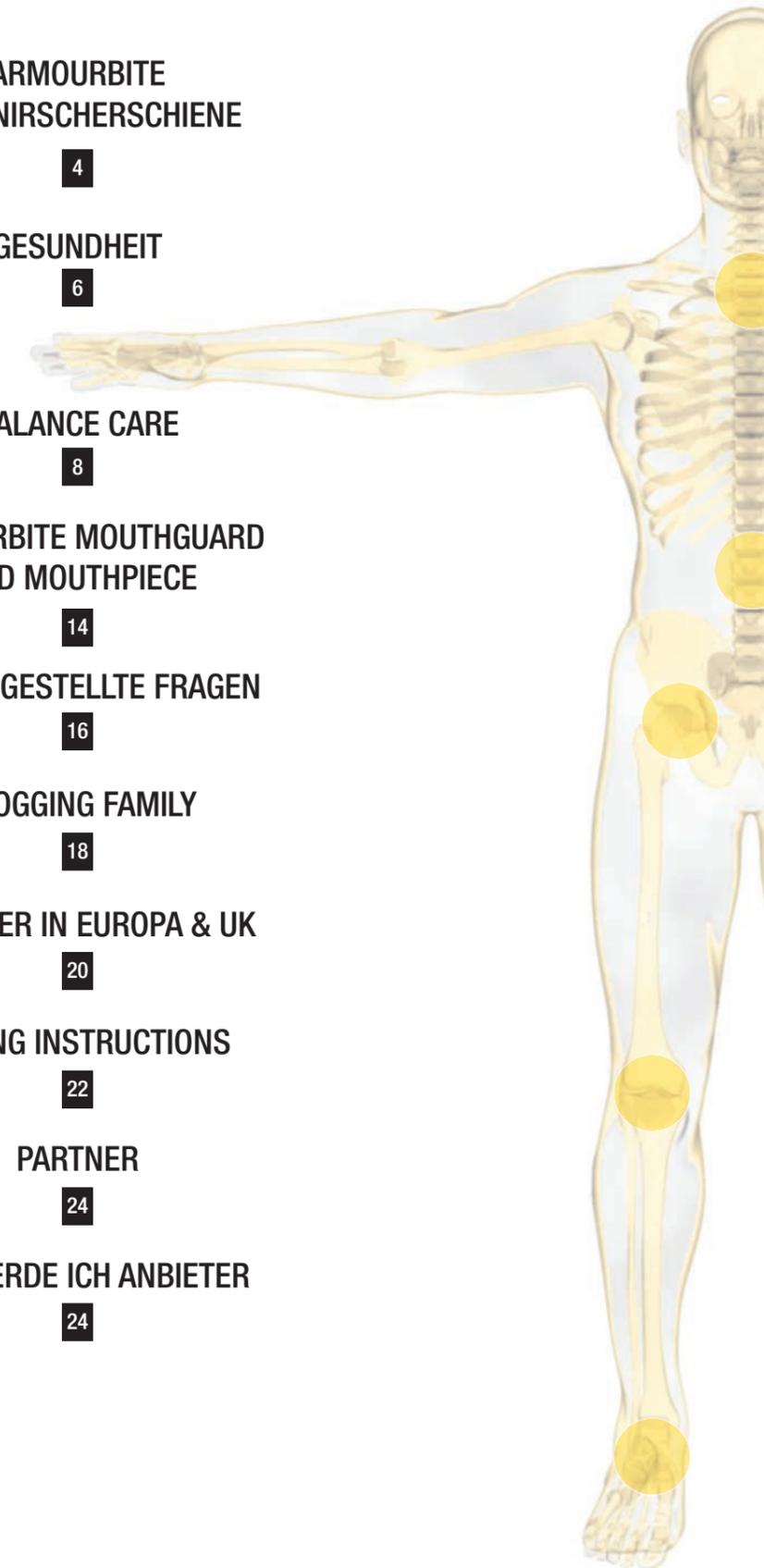

# ARMOURBITE ALS KNIRSCHERSCHIENE

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden an den Begleiterscheinungen von Zähneknirschen und Zähnepressen in der Nacht und unter Anspannung.

Zähneknirschen und Pressen verursacht neben Kiefergelenksproblemen eine lange Liste von Beschwerden. Neben Schlafstörungen des Partners durch die Knirschgeräusche kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schulter- Nacken,- und Rückenschmerzen. Ebenso werden die Zähne abgenutzt oder es kann sogar zu Zahnfrakturen kommen.

ArmourBite bietet mit seiner einzigartigen Kombination aus weicher Oberflächenstruktur kombiniert mit der harten Oberfläche der eingearbeiteten Wedges Hilfe bei den genannten Problemen.

Durch das Wedge Design kommt es zur Muskelentspannung und zur Eliminierung oder Reduzierung der Symptome.



# ERLÄUTERUNG DER EFFEKTE VON ARMOURBITE

The effects of mouthpiece use on gas exchange parameters during steady-state exercise in college-aged men and women



Dena P. Garner, Wesley D. Dudgeon, Timothy P. Scheett and Erica J. McDivitt J Am Dent Assoc 2011;142;1041-1047



Die Studie von Garner zur Wirkung von ArmourBite in Bezug auf die Vergrößerung der Schlundöffnung liefert die Erklärung für weitere Effekte.

Das erklärt auch ganz logisch die Ergebnisse aller weiteren Studien:

1. Besserer Gasaustausch bedeutet bessere Verbrennung und weniger Lactat
2. Weniger Lactat regelt in der NNR den Cortisollevel herunter
3. Weniger Cortisol bedeutet weniger Stress und mehr Entspannung

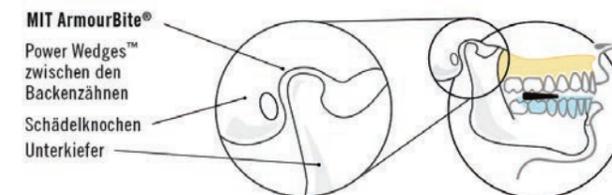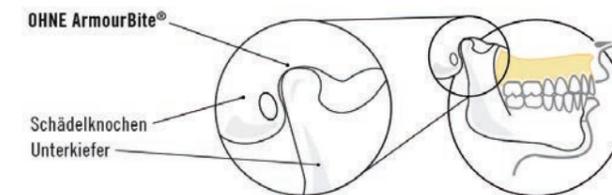

# GESUNDHEIT



# GESUNDHEIT

## VORTEILE MIT ARMOURBITE



Hilft bei Kopfschmerzen




Hilft bei Migräne



Hilft bei Rückenschmerzen



Hilft bei Schwindel

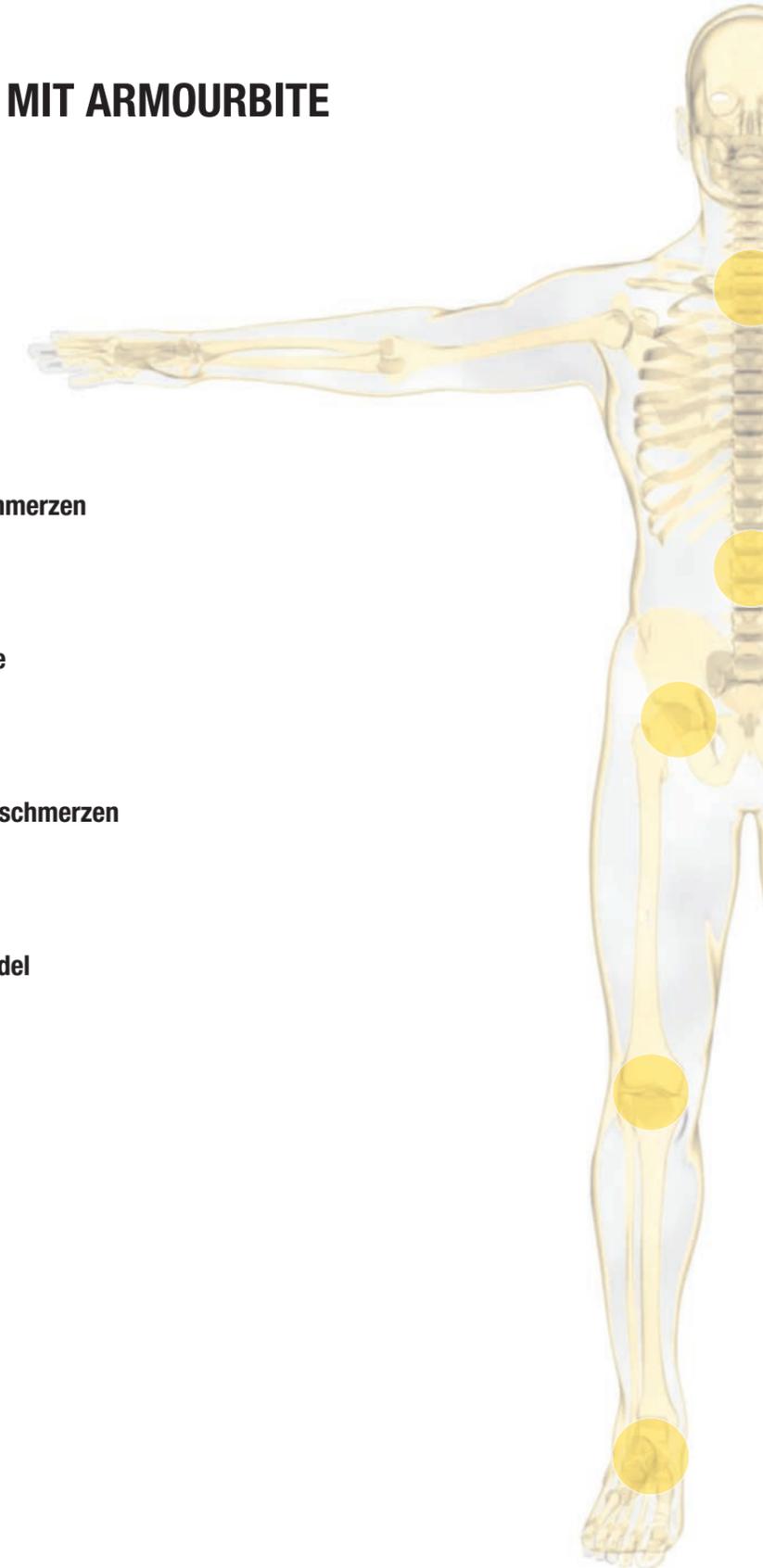



## VORTEILE MIT ARMOURBITE

Mit ArmourBite Mouthpiece führt zur Reduzierung oder Eliminierung von Symptomen der Neuromuskulären Dysbalance.

Nachgewiesen mit Messungen der Kaumuskelaktivitäten durch das wissenschaftlich dokumentierte BTS TMJOINT System.

## NEUROMUSKULÄRE DYSBALANCE WAS IST DAS?

Das Kausystem ist über Muskeln und Nerven mit anderen Teilen des Bewegungsapparats verbunden, die sich gegenseitig beeinflussen.

So können unterschiedliche Muskelaktivitäten zwischen rechter und linker Seite des Kausystems auch Beschwerden und Erkrankungen in anderen Bereichen des Stütz- und Bewegungsapparats auslösen.

## VON ZAHNÄRZTEN WIRD DAS UNDER ARMOUR PERFORMANCE MOUTHPIECE BEI FOLGENDEN PROBLEMEN VON PATIENTEN ERFOLGREICH EINGESETZT:

Das Kausystem ist über Muskeln und Nerven mit anderen Teilen des Bewegungsapparats verbunden, die sich gegenseitig beeinflussen.

So können unterschiedliche Muskelaktivitäten zwischen rechter und linker Seite des Kausystems auch Beschwerden und Erkrankungen in anderen Bereichen des Stütz- und Bewegungsapparats auslösen.

- ⊕ Verspannungen
- ⊕ Nackenschmerzen
- ⊕ Rückenschmerzen
- ⊕ Kopfschmerzen
- ⊕ Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates
- ⊕ Bewegungs- und Mobilitätseinschränkungen



# BALANCE CARE

## OHREN

Ohrgeräusche  
Höreinschränkungen  
Ohrschmerzen  
Schwindel

## NACKEN & SCHULTER

Nackensteife  
Nackenschmerzen  
Verspannung  
Schulterschmerzen  
Taubheit Arme/Finger

## KOPF

Kopfschmerzen, Migräne  
Nebenhöhlenbeschwerden  
Berührungsempfindlichkeit  
Sensibilitätsstörungen

## AUGEN

Schmerz hinter dem Auge  
Lichtempfindlichkeit

## MUND

Instabiler Biss  
Eingeschränkte Mundöffnung  
Ungleichmäßige Mundöffnung

## ZÄHNE

Temperaturempfindlichkeit  
Berührungsempfindlichkeit  
Zahnverschiebung  
Zahnhalbsdefekte  
Zähneknirschen

## KIEFER

Gelenkknacksen  
Reibegeräusche  
Kieferschmerzen  
Kieferklemme  
Unkontrollierte  
Kieferbewegungen

## HALS

Schluckbeschwerden  
Halsschmerzen  
Heiserkeit  
Räuspern  
Kloß- und Engegefühl

# BALANCE CARE

## VORTEILE MIT ARMOURBITE

**bc** balance<sup>®</sup>  
care

durch ArmourBite Mouthpiece

Diese unterschiedlichen Muskelaktivitäten können Ausdruck von falschen Bissverhältnissen und/ oder Kiefergelenksfehlfunktionen sein. Selbst ungenau angepasste Schuheinlagen können zu diesen Dysbalancen führen. Unbewusstes Kauen und Zähneknirschen (tagsüber bei Stress oder in der Nacht) führen zu bis zu 1.500 Zahnkontakten pro Tag.


Bei Fehlfunktionen geben diese Zahnkontakte bei jeder Berührung die Fehlinformation an die Kaumuskulatur weiter und verschlimmern so den Zustand.

Patienten mit Neuromuskulärer Dysbalance leiden häufig an folgenden Symptomen: Kopfschmerzen und Migräne, Schwindel und Tinnitus, Nacken-, Schulter-, Rückenschmerzen, Verspannungen, Einschränkungen bei seitlichen Kopfdrehbewegungen, Schulter-Arm „Syndrom“ mit Taubheitserscheinungen, Beckenschiefstand und dadurch funktionell bedingte unterschiedliche Beinlänge.

Auch bei scheinbar perfekten Bissverhältnissen können folgende Gründe für Neuromuskuläre Dysbalance verantwortlich sein: zu hohe oder zu niedrige Füllungen, Kronen, Brücken und Prothesen. Zahnwanderungen aufgrund Parodontose, Zahnwanderungen aufgrund Kieferorthopädischer Behandlung, fehlende Zähne.

**DIE DURCHWEGS POSITIVEN  
ERFAHRUNGEN IN DIESEN  
ALLTÄGLICHEN BEREICHEN WERDEN  
AUCH VON PHYSIOTHERAPEUTEN  
BESTÄTIGT.**

# BALANCE CARE

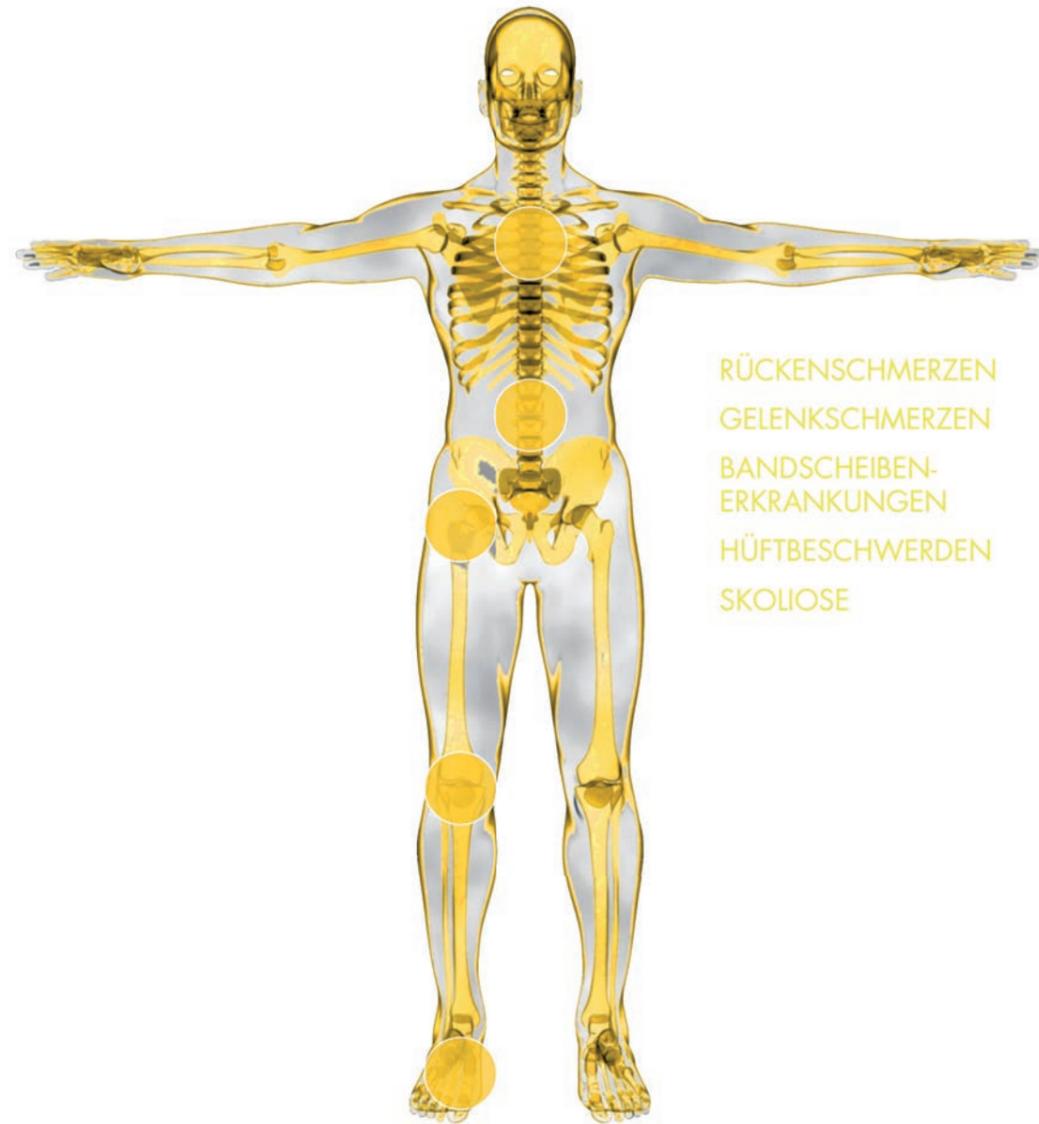


RÜCKENSCHMERZEN  
 GELENKSCHMERZEN  
 BANDSCHEIBEN-  
 ERKRANKUNGEN  
 HÜFTBESCHWERDEN  
 SKOLIOSE



# BALANCE CARE

ARMOURBITE WIRKSAMKEIT NACHGEWIESEN MIT DEM WISSENSCHAFTLICH DOKUMENTIERTEN BTS TMJOINT SYSTEM.

## TMJOINT – EMG Mess

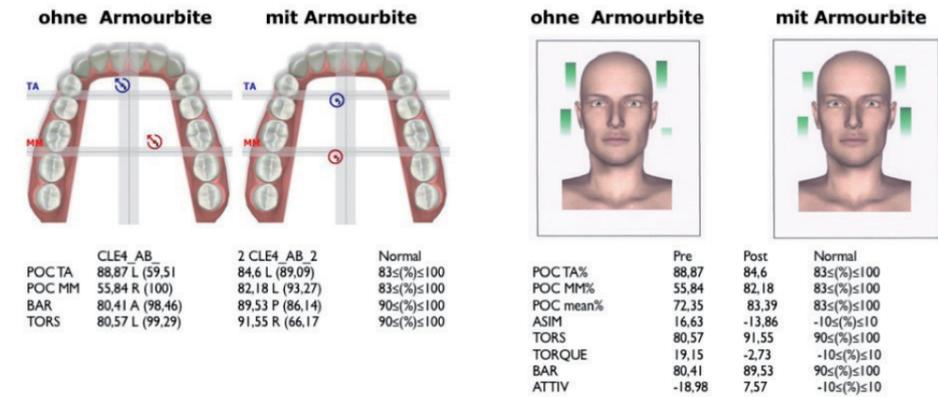

Von einigen Zahnärzten wurde das Under Armour Performance Mouthpiece bei folgenden Problemen von Patientenerfolgreich eingesetzt:

- ⊕ Verspannungen
- ⊕ Nackenschmerzen
- ⊕ Rückenschmerzen
- ⊕ Kopfschmerzen
- ⊕ Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparates
- ⊕ Bewegungs- und Mobilitätseinschränkungen
- ⊕ Büroarbeit
- ⊕ Computerarbeit
- ⊕ Hausarbeit
- ⊕ Gartenarbeit
- ⊕ lange Autofahrten
- ⊕ längere Flugreisen
- ⊕ langes Sitzen
- ⊕ sportliche Freizeitaktivitäten zur Erzielung besserer körperlicher Fitness

# ARMOURBITE MOUTHPIECE

ARMOURBITE MOUTHGUARD und MOUTHPIECE sind erhältlich in 2 Versionen.  
Boil & Bite und als Individuelle Version. Passgenau und komfortabel.



Boil & Bite



Individuelle Version

## ARMOURBITE MOUTHPIECE

ArmourBite Mouthpiece mit der patentierten Wedge Technologie führt zur Verlagerung des Unterkiefers und entkoppelt dadurch die Kräfte des Unterkiefers beim Knirschen. Eine Muskelentspannung ist die Folge. ArmourBite Mouthpiece in der Boil & Bite Version ist perfekt geeignet als Soforthilfe bei Patienten mit CMD Problematik und körperlichen Beschwerden verursacht durch eine Neuromusculäre Dysbalance.

### HIGHLIGHTS

- Kraftsteigernd – bis zu 20% mehr Kraft
- Erhöhte Ausdauer – Laktatsäureaufbau um 25% reduziert
- Verbesserte reaktionsfähigkeit – bis zu 12% schnellere Reaktion

# ARMOURBITE MOUTHGUARD



Boil & Bite



Individuelle Version

## ARMOURBITE MOUTHGUARD

ArmourBite Mouthguard mit der patentierten Wedge Technologie führt zur Verlagerung des Unterkiefers und entkoppelt dadurch die Kräfte des Unterkiefers beim Knirschen. Eine Muskelentspannung ist die Folge. ArmourBite Mouthpiece in der Boil & Bite Version ist perfekt geeignet als Soforthilfe bei Patienten mit CMD Problematik und körperlichen Beschwerden verursacht durch eine Neuromusculäre Dysbalance.

### HIGHLIGHTS

- Kraftsteigernd – bis zu 20% mehr Kraft
- Erhöhte Ausdauer – Laktatsäureaufbau um 25% reduziert
- Verbesserte reaktionsfähigkeit – bis zu 12% schnellere Reaktion
- Schutz gegen Stöße und Schläge – mehr Sicherheit und voller Schutz

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



## WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN ARMOURBITE UND HERKÖMMLICHEN KNIRSCHERSCHIENEN?

Knirscherschienen sollen Zähne und Kiefergelenk vor den Auswirkungen des Knirschens schützen. ArmourBite kann aber viel mehr. Durch die patentierte Wedgetechnologie wird ein Aufbiss im Bereich der ersten Backenzähne erzielt. Dadurch kommt es zu einem unmittelbaren Einfluss auf die umgebenden Muskeln und Rezeptoren, die zu einer Entspannung und Verminderung oder Beseitigung der Beschwerden führen.

## WER SOLLTE ARMOURBITE TRAGEN?

ArmourBite ist geeignet für alle Patienten, die unter Kopfschmerzen, Migräne, Verspannungen an Hals und Rücken, Rückenschmerzen, Schwindel etc. leiden.

## WIE ERHÄLT DER PATIENT SEINEN INDIVIDUELL HERGESTELLTEN ARMOURBITE?

Alle als Anwender bei RB Dental Solutions gelisteten Zahnärzte können den ArmourBite für Patienten anfertigen. Dazu werden vom Patienten Abdrücke von Ober- und Unterkiefer genommen. Zusammen mit einer Bissregistrierung werden die Abdrücke zusammen mit den patientenspezifischen Angaben an das ArmourBite zertifizierte und exclusive Herstellerlabor RB Dental Solutions geschickt. Zur endgültigen Anpassung wird das ArmourBite wieder zurück an den Zahnarzt geschickt.

## KANN AUCH EIN NICHT ALS ANWENDER GELISTETER ZAHNARZT DIE ARMOURBITE SCHIENEN SEINEN PATIENTEN ANBIETEN?

Prinzipiell ja, dazu muss er vorher zertifizierter Anbieter werden. Jederzeit stehen wir für Fragen von interessierten Zahnärzten zur Verfügung.

# BLOGGING FAMILY

WERDE TEIL DER ARMOURBITE.DE COMMUNITY

## BLOGGING FAMILY

Lass Dich von ArmourBite in Deinem Alltag begleiten, berichte über Deine eigenen Erfahrungen, nehme an den Deutschland weiten ArmourBite Challenges teil, sei einer der 20 in Deutschland ausgestatteten ArmourBite friends.

Bewerbe Dich jetzt unter [www.armourbite.de](http://www.armourbite.de)




**MARTIN TOMCZYK**

FRIEND OF THE BRAND



**MATTHIAS PAPKE**

UA PERFORMANCE TEAM

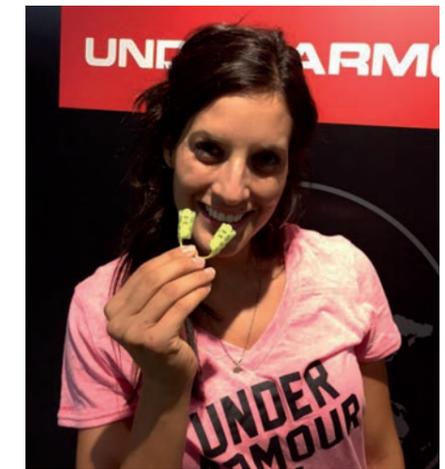

**JULIA DUJMOVITS**

Snowboard Olympiasiegerin



**ANNA FENNINGER**

Weltcup Gesamtsiegerin, Olympiasiegerin



**ROMAN ROHRMOSER**

Freeskier



**PAKETDIENST-LIEFERANTIN**

ArmourBite ist Urlaub für meinen Kiefer



**WELSH RUGBY UNION**

OFFICIAL TECHNICAL SUPPLIER



**ROBERT STEINBACHER**



**CARMEN THALMANN**

Austrian Ski Federation schwört auf ArmourBite



**FLORIAN MUNTEANU**

SCHWERGEWICHTSBOXER



**WALTER ALBINGER**

SILBER- UND GOLDMEDAILLENGEWINNER  
IM HANDBIKE



**JEFF VERMEULEN**

BAHNRADFAHREN

# PROVIDER IN EUROPA & UK

FINDE EINEN ZAHNARZT, SHOP ODER TRAINER IN DEINER NÄHE.





# ARMOURBITE® / ARMOURBITE® ARMOURSHIELD® MOUTHPIECE



## MOUTHGUARD ANPASSANLEITUNG

## MOUTHPIECE ANPASSANLEITUNG

Bitte lesen Sie sorgfältig alle Instruktionen bevor Sie Ihren Mouthguard anpassen.

Was brauchen Sie, um den Mouthguard im Kochtopf anzupassen?

- Einen Kochtopf, um Wasser zu kochen
- Stoppuhr (Timer)
- Schüssel mit eiskaltem Wasser
- Spiegel

Was brauchen Sie, um das Mouthpiece anzupassen?

- Einen Kochtopf, um Wasser zu kochen
- Stoppuhr (Timer)
- Löffel oder Gabel
- Schüssel mit eiskaltem Wasser
- Spiegel



1. Bringen Sie das Wasser in dem 10cm tiefen Kochtopf zum Kochen, danach nehmen Sie Topf vom Herd.



**90 Sek.**  
heißes Wasser

Für die Anpassung bringen Sie den Halter an den Mouthguard und während Sie den Halter festhalten, tauchen Sie den Mouthguard für 90 Sekunden in das heiße Wasser ein.



**02 Sek.**  
kaltes Wasser

Danach den Mouthguard für max. 2 Sekunden in die Schüssel mit kaltem Wasser geben.



**1:00 Min.**

Um das Anpassen im Mund zu gewährleisten, benutzen Sie einen Spiegel womit Sie die genau Ausrichtung und die Bedeckung Ihrer Zähne kontrollieren können.

Gleichzeitig führen Sie folgende Schritte für 1 Minute durch:

- Beißen Sie gleichmäßig mit leichter Kraft auf den Mouthguard
- Pressen Sie die Zunge gegen Ihren Gaumen und mit leicht saugender Bewegung schaffen Sie ein Vakuum zwischen Gaumen und Mouthguard wobei sämtliches Wasser und Luft entweicht.
- Fahren Sie mit Ihrer Finger entlang der Außenseite des Mouthguards entlang, um die Zähne abzuformen.



**5:00 Min.**  
kaltes Wasser

Nachdem der Anpassungsprozess beendet ist, entfernen Sie den Mouthguard aus Ihrem Mund, legen Sie ihn komplett flach in die Schüssel mit kaltem Wasser für weitere 5 Minuten, damit das Material wieder fest wird.

*Nach Anpassen des Mouthguard's kann der Halter durch ein ArmourPlate ersetzt werden. Dies ist austauschbar indem man den Mouthguard dreht, dadurch springt die Platte oder der Halter aus dem Mouthguard.*

ArmourBite™/ArmourShield® Mouthguards sind für das Tragen im Oberkiefer entwickelt worden und diese Produkte müssen entsprechend der Gebrauchsanweisung angepaßt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Ein beschädigter, veränderter oder unsachgemäß montierter Mundschutz bietet nicht den gleichwertigen Schutz.



1. Bringen Sie das Wasser im 10cm tiefen Kochtopf zum Kochen, danach nehmen Sie das Wasser vom Herd.



**45 Sek.**  
heißes Wasser

Tauchen Sie das Mouthpiece mit der Logo Seite nach unten für 45 Sekunden in das heiße Wasser ein.



**15 Sek.**

Entnehmen Sie das Mouthpiece aus dem Wasser mit Löffel oder Gabel und lassen Sie es für 15 Sekunden abkühlen.



Legen Sie das Mouthpiece auf Ihre Zähne. Während Sie den gelben Bogen eng an die Unterkieferfrontzähne platzieren, drücken Sie mit Ihren Mittelfinger und gleichzeitig mit Ihren Zeigefinger das Mouthpiece nach unten auf Ihre Unterkieferzähne.

Bitte folgendes Vorgehen für 1 Minute durchführen:

- Natürlich zu beißen.
- Leicht das Mouthpiece an Ihr Zahnfleisch andrücken, indem Sie entweder das Material an der Wange von außen anmassieren oder von innen andrücken.
- leicht das Mouthpiece ansaugen.



**10:00 Min.**  
kaltes Wasser

Nachdem der Anpassungsprozess beendet ist, entfernen Sie den Mouthguard aus Ihrem Mund, legen Sie ihn komplett flach in die Schüssel mit kaltem Wasser für weitere 5 Minuten, damit das Material wieder fest wird.

ArmourBite® Mouthpiece ist zum Tragen auf den Unterkieferzähnen entwickelt worden und muß entsprechend der Gebrauchsanweisung angepaßt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten

### PFLEGEHINWEISE:

- Beschleifen Sie Ihr Mouthguard nicht, dadurch kann sich die Materialien voneinander lösen und dadurch erlischt die Garantie.
- Lassen Sie Ihr Mouthguard nicht in der direkten Sonnenlicht oder in einem aufgeheiztem Auto für längere Zeit liegen
- UA Mouthwear Freshener Spray sollte nach jedem Gebrauch verwendet werden, um Ihren Mundschutz frisch und sauber zu halten.
- Schützen Sie Ihren Mundschutz durch die Aufbewahrung in einem UA Mouthwear Behälter.



Die Produkte sind erhältlich über [www.mouthwearexperts.de](http://www.mouthwearexperts.de)  
Passen Sie Ihren Mundschutz nach den Anpassvorschriften an.

ARMOURBITE®/ARMOURSHIELD® MOUTHGUARD  
LIMITIERTE GARANTIE

**Zertifikat für eingeschränkte Garantie und Garantiefreistellung:**  
Bite Tech Inc. ( Bite Tech ) garantiert für die Dauer eines (1) Jahres ab Kaufdatum, dass dieser Mundschutz frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, welche für Zerstörung und Verletzung von gesunden Zähnen des Käufers verantwortlich sein könnten, sofern der Mundschutz korrekt angepasst wurde. **Limitierung der Verantwortlichkeit:**

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Diese beschränkte Garantie gilt nur für Verletzungen des Käufers Zähne, die frei von allen vorhandenen natürlichen oder unnatürlichen Defekten, einschließlich zahnärztlichen Arbeit sind. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Käufer eine Zahnverletzungen in einem überwachten sportliche Wettbewerb oder vom Trainer überwachten Training erlitt, sonst ist eine Garantie ausgeschlossen. Es wird keine Garantie übernommen für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit Martial Arts, Mixed Martial Arts, Boxen oder ähnlichen Kämpfen oder Kampfsport oder Tätigkeit entstehen. Bite Tech's Verpflichtung unter dieser Garantie sind auf die tatsächlichen durch den Benutzer für notwendige zahnärztliche Behandlung entstandenen Kosten beschränkt, die durch einen entsprechend lizenzierten Zahnarzt durchgeführt wird. Die Haftung ist limitiert bis zu einem Maximum von \$ 500 pro verletzten Zahn oder mit einer Höchsthaftung von 32.000 \$ pro Vorfall. Bite Tech's Verpflichtungen werden reduziert um den Betrag der Kostenersatzung für die Behandlung der Verletzungen, welche durch den Versicherungsschutz des Anwenders abgedeckt sind. Diese eingeschränkte Garantie beinhaltet keine Erstattung oder Entschädigung für kieferorthopädische Behandlungen oder Vorbereitung eines Zahn als Anker für eine Brücke.

Die hier beschriebenen Rechtsmittel sind ausschliesslich und die komplette Verantwortlichkeit von Bite Tech in Bezug auf Verwendung dieses Mundschutz ist beschränkt und wird weder durch anderweitige Verträge, Garantien, Fahrlässigkeit, Schadensersatzforderungen, Haftung oder anderweitige Forderungen beeinflusst. In keinem dieser Fälle haftet Bite Tech für Folgeschäden oder Sonderschäden.

**BEDINGUNGEN:** Diese beschränkte Garantie gilt nur für Verletzungen an Zähnen des Käufers, die frei von allen vorhandenen natürlichen oder unnatürlichen Defekten einschließlich zahnärztlichen Arbeiten sind. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Käufer eine Zahnverletzungen in einem überwachten sportlichen Wettbewerb oder vom Trainer überwachten Training erlitt, alle anderen Verletzungen sind ausgeschlossen. Bite Tech wird keine Verantwortung oder Haftung übernehmen, es sei denn folgendes trifft zu:

- Der Mundschutz wurde in Übereinstimmung mit der gedruckten dem Produkt beigefügten Anweisungen benutzt und
- Der Mundschutz wurde nicht beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert, weder durch das Kauen auf dem Mundschutz noch durch andere Maßnahmen, indem die IST-Konfiguration oder chemische Zusammensetzung (außer durch die Anpassung) geändert wurde, ausgenommen durch das natürliche Tragen, und
- Es sei denn, eine vollständige, schriftliche Mitteilung über die Verletzungen und Schäden, zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs liegt vor und Bite Tech erhält diese Information innerhalb von dreißig (30) Tage nach dem Auftreten der Verletzung und
- Der Benutzer stellt eine schriftliche Erklärung von einem entsprechend lizenzierten behandelnden Zahnarzt innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Verletzung zur Verfügung, welche die notwendige Behandlung der Verletzung, Umfang der Verletzung, Beschädigung darstellt und die Begründung zur geplanten Behandlung zur Verfügung stellt. Dies muss zusammen mit der Angabe der Versicherung und Erstattungsbeitrages erfolgen; und
- Der Benutzer schickt eine schriftliche Aussage von einem betreuenden Trainer oder Spiel-Offiziellen, dass der Teilnehmer den Mundschutz korrekt zum Zeitpunkt der Verletzung getragen hat und
- Der verwendete Mundschutz Bite Tech mit einer schriftlichen Benachrichtigung über die Verletzung zurückgegeben wird. Der Mundschutz geht in das Eigentum von Bite Tech nach Erhalt der Rücksendung über.

KEIN MOUTHGUARD KANN JEDE MÖGLICHKEIT VON VERLETZUNGEN VERMEIDEN ODER VOR JEDE ART VON ZAHNSCHÄDEN SCHÜTZEN, KEINE DERARTIGEN GARANTIE WERDEN GEMACHT. DIESE ERKLÄRUNG GILT ZUR ABGELTUNG BESAGTER GARANTIE, ALLE ANDEREN ODER INDIKREKTEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND JEDE GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS DEM VERLAUF DES HANDELNS FÜR GEBRAUCH UND HANDEL ERGIBT. AUSDRÜCKLICH SOWEIT DARIN NICHTS ANDERES VORGEGEHEN IST, BITE-TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUST, SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE AUF FAHRLÄSSIGEN DESIGN ODER MATERIALDEFEKTE ODER VERARBEITUNG DES MOUTHGUARDS BERUHEN.

Bewahren Sie diese zahnärztliche Garantie, Haftungsausschluss und Quittung bei Ihren Unterlagen auf. Bei Verletzungen, schicken Sie den Mouthguard, Zahlungsbeleg des Kaufs, die INFORMATION über die Verletzung und begleitende schriftliche Aussagen zu Bite Tech, Inc. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere US- und internationale Patente und angemeldete Patente geschützt. Bitte besuchen Sie [www.ArmourBite.com](http://www.ArmourBite.com) für weitere Details.

ARMOURBITE®/ARMOURSHIELD® MOUTHGUARD PRODUKT  
ERSATZ GARANTIERT

Bite Tech Inc. ( Bite Tech ) garantiert für die Dauer eines (1) Jahres ab Kaufdatum, dass dieser Mundschutz frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, welche für Zerstörung und Verletzung von gesunden Zähnen des Käufers verantwortlich sein könnten, sofern der Mundschutz korrekt angepasst wurde. **Limitierung der Verantwortlichkeit:**

Diese Garantie tritt anstelle aller anderen Gewährleistungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht implizierte Garantie für einen bestimmten Zweck und jede stillschweigende Gewährleistung, die sich aus der Nutzung, der kundenspezifischen Nutzung oder Handel ergibt. Außer wie ansonsten hierin ausdrücklich aufgeführt wurde, lehnt Bite Tech jede Haftung für Verluste, Verletzungen oder Schäden, die auf fahrlässiges Design oder Defekte in Material und Verarbeitung des Mouthpiece's entstanden sind. Produkte, die nicht ordnungsgemäß benutzt wurden wurde oder die Lebensdauer überschritten wurde können nicht zurückgegeben werden. Mißbrauch kann beinhaltet: Kauen auf dem Produkt, Beschleifen, und / oder der Verwendung des Produkts auf eine Weise, die mit vorgesehenen Gebrauch nicht übereinstimmt

- Für alle Garantieansprüche in Bezug auf Produkte zum Selbstanpassen der Under Armour Performance Mouthwear™ Produkte, bitte kontaktieren Sie BITE TECH customer service unter: [customerservice@bitetech.com](mailto:customerservice@bitetech.com)
- oder rufen Sie: 1-877-248-3832 für weiter Informationen an..



## ARMOURFIT™ ANPASSANLEITUNG



## KOCHTOPF

## MICROWELLE

Bitte lesen Sie sorgfältig alle Instruktionen bevor Sie Ihren Mouthguard anpassen.

Was brauchen Sie, um den Mouthguard im Kochtopf anzupassen?

- Eine Kochtopf von 10cm Tiefe für kochendes Wasser
- ca. 25 x 25cm Schüssel mit kaltem Wasser
- Stoppuhr (Timer)
- Löffel oder Gabel
- Spiegel

Was brauchen Sie um den Mouthguard in der Mikrowelle anzupassen?

- Mikrowelle (1000 Watt +)
- Mikrowellen – Sicherheits Geschirr
- ca. 25 x 25cm Schüssel mit kaltem Wasser
- Nasses Papierhandtuch (Küchenrolle)
- Spiegel
- Stoppuhr (Timer)



1. Bringen Sie das Wasser in dem 10cm tiefen Kochtopf zum Kochen, danach nehmen Sie Topf vom Herd.



**30 Sek.**  
heißes Wasser

Platzieren Sie den Mouthguard in das heiße Wasser und lassen Sie ihn für 30 Sekunden ruhen. Danach vorsichtig den Mouthguard mit Löffel oder Gabel aus dem Kochtopf entfernen.



**02 Sek.**  
kaltes Wasser

Sofort den Mouthguard für 2 Sekunden in die Schüssel mit kaltem Wasser geben. Bitte beachten Sie, dass sich die Seiten des Mouthguards nicht falten (übereinander falten) und das Material zusammenklebt, damit der optimale Anpassungsprozess nicht erschwert wird.



Gleiten Sie sanft mit Ihren beiden Daumen seitlich an den Oberkieferseitenzähnen vorbei und überprüfen, dass genügend Platz für die Anpassung des Mouthguards an Ihren Zähnen besteht. Benutzen Sie einen Spiegel und platzieren den Mouthguard vorsichtig in Ihrem Mund. Bei der Anpassung achten Sie darauf, dass die Markierung in der Mitte des Mouthguards und die Mitte Ihrer Frontzähne eine Linie bilden.



**2:00 Min.**

Um die perfekte Anpassung zu überprüfen, beißen Sie sanft und natürlich auf Ihren Mouthguard für zwei Minuten (Fixieren Sie Ihren Biss). Bitte lutschen Sie nicht an Ihrem Mouthguard und beißen nicht auf die Seitenwände.

- Beißen Sie gleichmäßig mit leichter Kraft auf den Mouthguard
- Pressen Sie die Zunge gegen Ihren Gaumen und mit leicht saugender Bewegung schaffen Sie ein Vakuum zwischen Gaumen und Mouthguard wobei sämtliches Wasser und Luft entweicht.
- Fahren Sie mit Ihrer Finger entlang der Außenseite des Mouthguards entlang, um die Zähne abzuformen.



**5:00 Min.**  
kaltes Wasser

Nachdem der Anpassungsprozess beendet ist, entfernen Sie den Mouthguard aus Ihrem Mund, legen Sie diesen komplett flach in die Schüssel mit kaltem Wasser für weitere 5 Minuten damit das Material wieder fest wird.

**WIEDERHOLUNG DER ANPASSUNG:**  
Falls eine erneute Anpassung erforderlich ist, wiederholen Sie Schritte 1-6. Falls Sie eine engeren Passform beforzugen, dann fügen Sie 15 Sekunden bei Schritt 2 Aufkochzeit in der Mikrowelle dazu. NIE DIE MIKROWELLENKOCHZEIT VON 70 SEKUNDEN ÜBERSCHREITEN.

ArmourFit™ ist für das Tragen der Oberkiefer entwickelt worden und dies muß entsprechend der Gebrauchsanweisung angepaßt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Ein beschädigter, veränderter oder unsachgemäß angepasster Mundschutz bietet nicht den gleichwertigen Schutz.

### PFLEGEHINWEISE:

- UA Mouthwear Freshener Spray sollte nach jedem Gebrauch verwendet werden, um Ihren Mundschutz frisch und sauber zu halten.
- Schützen Sie Ihren Mundschutz durch die Aufbewahrung in einem UA Mouthwear Behälter.
- Die Produkte sind erhältlich über [www.mouthwearexperts.de](http://www.mouthwearexperts.de)
- Passen Sie Ihren Mundschutz nach den Anpassvorschriften an.

### Limitierte Garantie für Zähne

**Zertifikat für eingeschränkte Garantie und Garantiefreistellung:**  
Bite Tech Inc. ( Bite Tech ) garantiert für die Dauer eines (1) Jahres ab Kaufdatum, dass dieser Mundschutz frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, welche für Zerstörung und Verletzung von gesunden Zähnen des Käufers verantwortlich sein könnten, sofern der Mundschutz korrekt angepasst wurde. **Limitierung der Verantwortlichkeit:**

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Diese beschränkte Garantie gilt nur für Verletzungen des Käufers Zähne, die frei von allen vorhandenen natürlichen oder unnatürlichen Defekten, einschließlich zahnärztlichen Arbeit sind. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Käufer eine Zahnverletzungen in einem überwachten sportliche Wettbewerb oder vom Trainer überwachten Training erlitt, sonst ist eine Garantie ausgeschlossen. Es wird keine Garantie übernommen für Schäden oder Verletzungen im Zusammenhang mit Martial Arts, Mixed Martial Arts, Boxen oder ähnlichen Kämpfen oder Kampfsport oder Tätigkeit entstehen. Bite Tech's Verpflichtung unter dieser Garantie sind auf die tatsächlichen durch den Benutzer für notwendige zahnärztliche Behandlung entstandenen Kosten beschränkt, die durch einen entsprechend lizenzierten Zahnarzt durchgeführt wird. Die Haftung ist limitiert bis zu einem Maximum von \$ 500 pro verletzten Zahn oder mit einer Höchsthaftung von 32.000 \$ pro Vorfall. Bite Tech's Verpflichtungen werden reduziert um den Betrag der Kostenersatzung für die Behandlung der Verletzungen, welche durch den Versicherungsschutz des Anwenders abgedeckt sind. Diese eingeschränkte Garantie beinhaltet keine Erstattung oder Entschädigung für kieferorthopädische Behandlungen oder Vorbereitung eines Zahn als Anker für eine Brücke.

Die hier beschriebenen Rechtsmittel sind ausschliesslich und die komplette Verantwortlichkeit von Bite Tech in Bezug auf Verwendung dieses Mundschutz ist beschränkt und wird weder durch anderweitige Verträge, Garantien, Fahrlässigkeit, Schadensersatzforderungen, Haftung oder anderweitige Forderungen beeinflusst. In keinem dieser Fälle haftet Bite Tech für Folgeschäden oder Sonderschäden.

**BEDINGUNGEN:** Diese beschränkte Garantie gilt nur für Verletzungen an Zähnen des Käufers, die frei von allen vorhandenen natürlichen oder unnatürlichen Defekten einschließlich zahnärztlichen Arbeiten sind. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der Käufer eine Zahnverletzungen in einem überwachten sportlichen Wettbewerb oder vom Trainer überwachten Training erlitt, alle anderen Verletzungen sind ausgeschlossen. Bite Tech wird keine Verantwortung oder Haftung übernehmen, es sei denn folgendes trifft zu :

- Der Mundschutz wurde in Übereinstimmung mit der gedruckten dem Produkt beigefügten Anweisungen benutzt und
- Der Mundschutz wurde nicht beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert, weder durch das Kauen auf dem Mundschutz noch durch andere Maßnahmen, indem die IST-Konfiguration oder chemische Zusammensetzung (außer durch die Anpassung) geändert wurde, ausgenommen durch das natürliche Tragen, und
- Es sei denn, eine vollständige, schriftliche Mitteilung über die Verletzungen und Schäden, zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs liegt vor und Bite Tech erhält diese Information innerhalb von dreißig (30) Tage nach dem Auftreten der Verletzung und
- Der Benutzer stellt eine schriftliche Erklärung von einem entsprechend lizenzierten behandelnden Zahnarzt innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Verletzung zur Verfügung, welche die notwendige Behandlung der Verletzung, Umfang der Verletzung, Beschädigung darstellt und die Begründung zur geplanten Behandlung zur Verfügung stellt. Dies muss zusammen mit der Angabe der Versicherung und Erstattungsbeitrages erfolgen und
- Der Benutzer schickt eine schriftliche Aussage von einem betreuenden Trainer oder Spiel-Offiziellen, dass der Teilnehmer den Mundschutz korrekt zum Zeitpunkt der Verletzung getragen hat und
- Der verwendete Mundschutz Bite Tech mit einer schriftlichen Benachrichtigung über die Verletzung zurückgegeben wird. Der Mundschutz geht in das Eigentum von Bite Tech nach Erhalt der Rücksendung über.

KEIN MOUTHGUARD KANN JEDE MÖGLICHKEIT VON VERLETZUNGEN VERMEIDEN ODER VOR JEDE ART VON ZAHNSCHÄDEN SCHÜTZEN, KEINE DERARTIGEN GARANTIE WERDEN GEMACHT. DIESE ERKLÄRUNG GILT ZUR ABGELTUNG BESAGTER GARANTIE, ALLE ANDEREN ODER INDIKREKTEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND JEDE GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS DEM VERLAUF DES HANDELNS FÜR GEBRAUCH UND HANDEL ERGIBT. AUSDRÜCKLICH SOWEIT DARIN NICHTS ANDERES VORGEGEHEN IST, BITE TECH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUST, SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE AUF FAHRLÄSSIGEN DESIGN ODER MATERIALDEFEKTE ODER VERARBEITUNG DES MOUTHGUARDS BERUHEN.

Bewahren Sie diese zahnärztliche Garantie, Haftungsausschluss und Quittung bei Ihren Unterlagen auf. Bei Verletzungen, schicken Sie den Mouthguard, Zahlungsbeleg des Kaufs, die INFORMATION über die Verletzung und begleitende schriftliche Aussagen zu Bite Tech, Inc. Dieses Produkt ist durch ein oder mehrere US- und internationale Patente und angemeldete Patente geschützt. Bitte besuchen Sie [www.ArmourBite.com](http://www.ArmourBite.com) für weitere Details

# PARTNER




Welsh Rugby Union



Dein Leben – Deine Entscheidung

Armourbite im Alltag

# WIE WERDE ICH ANBIETER

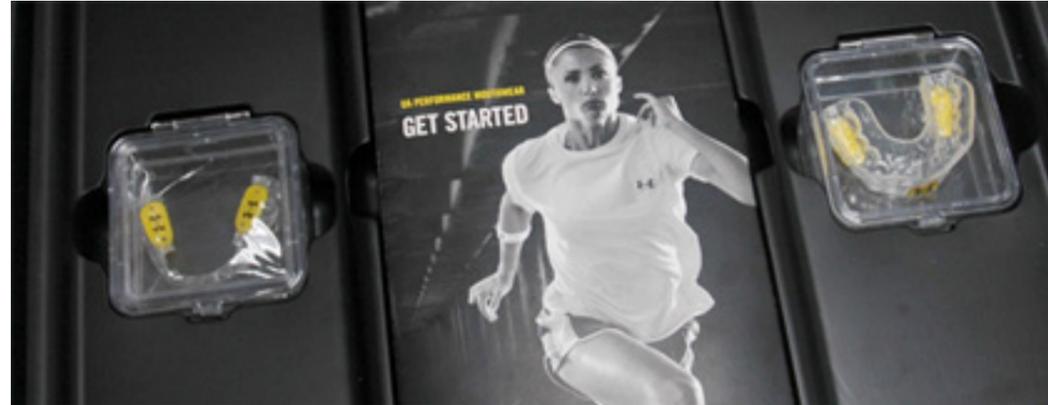

# WIE WERDE ICH ANBIETER

## WIE WERDE ICH AUTORISIERTER ARMOURBITE ANBIETER?

Bitte kontaktieren Sie unseren Vertriebspartner

HENRY SCHEIN  
FreeCall 0800-1400044  
[www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de)

Erwerben Sie ein Launch-Kit.  
Benutzen Sie das Marketingmaterial um Ihre Praxis damit zu bewerben.

Das Launch Kit beinhaltet:

Produktproben (2)  
Kunden Broschüren (50 Stück)  
Autorisierter ArmourBite-Anbieter Zertifikat  
patientenspezifische Bestellformulare  
Anweisungen  
Flip-Chart

# ARMOURBITE®



RB DENTAL SOLUTIONS – Exklusive Licensee

Dein Leben – Deine Entscheidung

Armourbite im Alltag

Become an athlete you want

Jeder kann ein besserer Athlet werden

R&B Dental Solutions GmbH  
Hauptstr. 42  
68259 Mannheim  
+49 - 151 - 50 400 122  
customerservice@armourbite.de  
www.armourbite.de

