

STECO TITANMAGNETICS® für alphatech®

DIE MAGNETISCHE ALTERNATIVE




Erfolg verbindet.

MAGNETATTACHMENTS FÜR VOLLPROTHESEN

Die implantologische Lösung für Patienten mit motorischen Einschränkungen sowie speziell in der Alterszahnheilkunde. Steco Titanmagnetics® sind auch auf kurzen Implantaten anwendbar.

Vorteile:

- einfaches Handling --> müheloses Ein- und Ausgliedern der Prothese
- problemlose Reinigung --> polierte Oberflächen, keine Hinterschnitte
- wirtschaftlich --> kein Matrizenwechsel

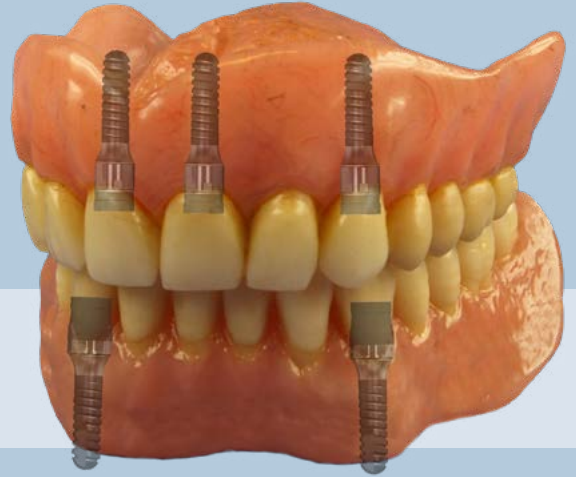

SPHÄRISCHE MAGNETE

- leicht gewölbte Oberfläche
- selbstzentrierend
- geringste seitliche Kräfteinleitung in das Implantat
- besonders für kurze Implantate geeignet




X-LINE	Prothesen- magnet	Insert
Höhe (mm)	2,65	3,00
Kopfdurchmesser (mm)		4,80
Abzugskraft (N/g)		1,6/163



ZUBEHÖR

Ratscheneinsatz

- Steckschlüsselprinzip zum Einschrauben des Inserts
- passend für viele gängige Drehmomentschlüssel
- sichere Handhabung durch magnetische Kopplung

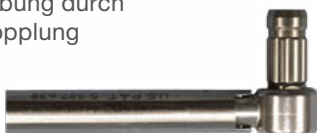


ZUBEHÖR

Positionsmanschette

- Die Positionsmanschette dient dem lagerichtigen Einpolymerisieren des Prothesenmagnetes. Der entstehende Resilienzabstand vermeidet das Zusammentreffen der beiden Magnete.
- Schutz des Implantates und Gewebes
 - ideal Chairside einzusetzen
 - Resilienzabstand mit Hilfe der Positionsmanschette (= 0,3 mm)



CHAIRSIDE DIREKTVERSORGUNG STEP-BY-STEP

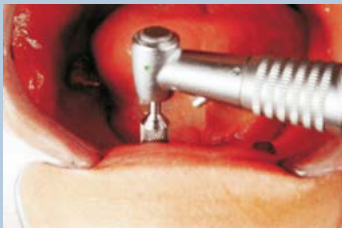

Die StecoTitanmagnetics® werden mit 20 Ncm eingeschraubt. Es stehen Ratscheneinsätze für zahlreiche implantatspezifische Ratschen zur Verfügung.



Aufsetzen der Positionsmanschetten und Prothesenmagnete.



Die freigeschliffene Prothesenbasis mit Kunststoff auffüllen, Prothese einsetzen und aushärten lassen.



Prothese basal ausarbeiten (fertiggestellte Unterkieferprothese).

LABSIDE NEUANFERTIGUNG STEP-BY-STEP



Einschrauben der StecoTitanmagnetics® mit 20 Ncm.



Niemals mit Zange einschrauben!



Funktionsabformung mit den Abformpfosten.



Bisschablone mit eingearbeiteten StecoTitanmagnetics®.



Aufstellung auf magnetretinierter Schablone.



Modellguss auf dem doublierten Modell.



Magnete im Modellguss fixiert.



Fertiggestellte Prothese.

ZUBEHÖR LABOR

Abformpfosten

- magnetische Abformung ohne Schrauben
- arretieren sich magnetisch auf dem Insert
- die Außengeometrie ermöglicht eine sichere Fixierung im Abformmaterial



ZUBEHÖR LABOR

Modellimplantate

- ermöglichen schnelle, hygienische Modellherstellung
- die Verwendung der Original-Implantatinserts auf dem Modell wird vermieden
- auf eine zeitaufwändige Reinigung des Implantataufbaus kann verzichtet werden




STECO TITANMAGNETICS®
für alphatech®

DIE MAGNETISCHE ALTERNATIVE

**PROTHESENMAGNET –
DAS AUFBAUPRINZIP**


Insert:

- einteilig
- wird direkt eingeschraubt

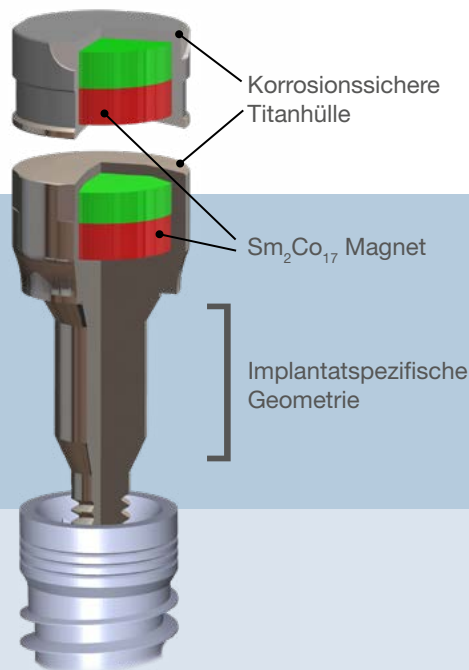

BI-MAGNETSYSTEM

Bei zwei offenen Magnetfeldern wirkt die Anziehungskraft über eine längere Strecke als bei Mono-Magnetsystemen.

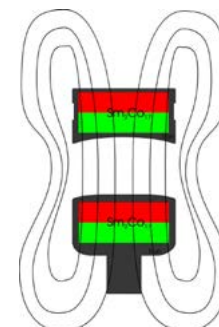

FREEFAX: 08000-40 00 44

FREETEL: 0800-150 00 55
www.henryschein-dental.de
Mail: info@henryschein.de

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis €	Anzahl
886280	alphatech Titanmagnet X-Linie D3,4	175,00 €	
886281	alphatech Titanmagnet X-Linie D3,8	175,00 €	
886282	alphatech Titanmagnet X-Linie D4,3	175,00 €	
886283	alphatech Titanmagnet X-Linie D5,0	175,00 €	
886284	Titanmagnet Prothesenmagnet X-Linie D4,8	49,00 €	
886285	Titanmagnet Positionsmanschette X-Linie N 1	7,50 €	
886286	Titanmagnet Positionsmanschette X-Linie N 2	7,50 €	
886287	Titanmagnet Abformpfosten X-Linie D4,8	45,00 €	
886288	Titanmagnet Modellimplantat X-Linie D4,8	49,00 €	
886289	Titanmagnet Ratscheneinsatz X-Linie (ISO-Schaft)	99,00 €	

Stand August 2020.

Praxisstempel



Datum / Unterschrift

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abbildungen sind Beispiele. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Die Henry Schein Dental Deutschland GmbH verwendet Ihre oben angegebenen Daten zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de