

CHECKLISTE BETRIEBSPAUSEN VON BEHANDLUNGSEINHEITEN: EMPFEHLUNGEN NACH LÄNGEREN STANDZEITEN



Inbetriebnahme von Behandlungseinheiten, Kompressor und Saugmaschine nach Standzeit

Wenn die gesamte Praxis stillgelegt wurde:

- Gegebenenfalls drei Tage vor Arbeitsbeginn den Praxishauptschalter einschalten, aber noch nicht die Behandlungsgeräte.
- Kompressor und Saugmaschine einschalten.
- An allen Wasserzapfstellen in der Praxis das Wasser einige Minuten laufen lassen.

Inbetriebnahme der Behandlungseinheiten nach Standzeit:

- Einschalten der Behandlungsgeräte.
- Betätigen Sie mehrmals die Mundglasfüller und Speibecken.
- Betreiben Sie alle wasserführenden Einrichtungen am Arbeitsplatz zwei Minuten mit Wasser/Spray.
- Sanierung/Intensiventkeimung durchführen und anschließend eine Wasserprobe entnehmen.
- Sollte der Grenzwert für Trinkwasser überschritten werden, muss ein Biofilm-Removing durchgeführt werden.
- Überprüfung aller Funktionen der Behandlungseinheiten.