

CHECKLISTE BETRIEBSPAUSEN VON BEHANDLUNGSEINHEITEN: EMPFEHLUNGEN VOR LÄNGEREN STANDZEITEN



Betriebspausen von Behandlungseinheiten, Kompressor und Saugmaschine

- Absauganlage mit Desinfektionsmittel durchspülen. Speibecken reinigen und desinfizieren entsprechend dem täglichen und wöchentlichem Pflegeplan des Herstellers.
- Oberflächen und Polster mit einem weichen Tuch reinigen und mit einem vom Hersteller zugelassenen Desinfektionsmittel desinfizieren.
- Patientenstuhl der Behandlungseinheit hochfahren.
- Alle Behandlungsgeräte einzeln ausschalten und den Druck von Wasser und Luft über die Multifunktionsspritze ablassen.

Wird die gesamte Praxis und nicht nur einzelne Behandlungszimmer für eine gewisse Zeit stillgelegt, sind außerdem die nachfolgenden Schritte erforderlich:

- Kompressor ausschalten und wenn möglich den Netzstecker ziehen.
- Saugmaschine ausschalten und wenn möglich den Netzstecker ziehen. Bei Nassabsaugungen den Filter entfernen und reinigen.

WICHTIG

Grundsätzlich sind die meisten Geräte in einer Zahnarztpraxis nicht für eine längere Betriebspause ausgelegt. In Behandlungseinheiten, Kompressoren und Sauganlagen können hohe Keimbelastungen und durch Ablagerungen gravierende Schäden entstehen, wenn sie zu lange außer Betrieb sind.

Deshalb weisen unsere Techniker darauf hin, dass die Geräte auch während einer längeren Betriebspause gemäß den Pflegeplänen der Hersteller durchgespült und gereinigt werden müssen.

Auf Wunsch kommt auch ein Techniker von Henry Schein einmal in der Woche für eine Stunde in Ihre Praxis, um die Geräte zu kontrollieren und einmal laufen zu lassen.

Nachfolgende Checkliste hilft Ihnen, die Geräte nach einer Betriebspause korrekt wieder in Betrieb zu nehmen.