

Mihmvogt zirkon-120				
	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)
Zirlux 16+ Normales Sinterprogramm	1	Raumtemperatur	1200	30
	2	1200	1300	0
	3	1300	1530	120
	4	1530	200	0

Mihmvogt zirkon-120				
	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)
Zirlux 16+ Schnell- Sinterprogramm für Einzelkronen und 3gl. Brücken	1	0	0	0
	2	Raumtemperatur	1150	0
	3	1150	1530	30
	4	1530	200	0

Mihmvogt zirkon-120				
	Stufe	Start Temp(°C)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min)
Zirlux Anterior Multi Normales Sinterprogramm	1	Raumtemperatur	1150	30
	2	1150	1300	0
	3	1300	1450	120
	4	1450	200	0

Mihmvogt zirkon-120				
	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)
Zirlux Anterior Multi Schnell- Sinterprogramm für Einzelkronen und 3gl. Brücken	1	0	0	0
	2	Raumtemperatur	1150	0
	3	1150	1450	60
	4	1450	200	0

Aufheizrate(°C/min)
8
2
4
8

Aufheizrate(°C/min)
0
50
4
50

Aufheizrate (°C/min)
8
2
4
8

Aufheizrate(°C/min)
0
30
3
50